

Szabó Zoltán Ottó e. v.
1185 Budapest,
Szerencse utca 6/a.
Telefon: 06-1-290-5768
Mobil: 06-20-9425-064
www.ottomat.hu
info@ottomat.hu

EHJMC023 szobai hívóegység (kezelőegység)

A hívóegység falra szerelhető kivitelű.

A hívás az alábbi módokon történhet:

- A hívógomb benyomásával
- A készülékbe bekötött vezetékes hívógombbal
- A készülékbe kötött aljzatokba csatlakoztatott vezetékes nyomógombokkal.

A hívás létrejöttét a készüléken villogó piros fényű LED jelzi, míg a tápfeszültség jelenlétét zöld fényű.

A törlés a készülék oldalán lévő mágneses törlővel történik. A törlőt kialakításából adódóan csak a nővér tudja kezelni (mágnes érintése a megfelelő helyre a készülék bal oldalán).

Kivitel: falra szerelt

Méretei: 85x80x10mm

Rögzítése: 2 db 8mm-es műanyag tiplivel, Reisser csavarral, vagy alkalmas szerelő dobozba Reisser csavarral.

Figyelem! Körmös rögzítéssel nem rendelkezik!

Csatlakozó vezeték: 4 x 0,6 mm² TQKM vezeték + 2x0,6mm² TQML vezeték

Védőcső mérete: Mü.III. 13,5 vagy vezetékcsatorna

Figyelem!

A vezetékek a telepítési rajzon feltüntetett színezéssel kerüljenek behúzásra.



Az ábrán látható módon a nyíllal jelölt nyílásba helyezve a csavarhúzó, majd jobbra, vagy balra kismértékben elcsavarva a készülék kinyitható.

A bekötéshez az alsó illesztő horonyból óvatosan emeljük ki, majd végezzük el a bekötést.

Amennyiben a készülékbe közvetlenül kerül bekötésre vezetékes nyomógomb, akkor a vezetékes nyomógombon lévő gumi átvezetőt a kábelrögzítő bilincs alá kell fogatni, a vezeték biztos megfogásának érdekében.

A sorkapocsba történő vezeték bekötésnél a gyengeáramú egységek bekötésénél általában szokásos gondossággal kell eljárni.

